



**Инструкция по подключению тонометра
UA-911BT(и весов UC-911BT)
к мобильному приложению
MyFitnessCompanion, работе с мобильным
приложением MyFitnessCompanion и порталом
(для смартфонов с ОС Android)**






Содержание



1. Поиск мобильного приложения MyFitnessCompanion в Google Play Store (Play Market).....	3
2. Установка программы MyFitnessCompanion.....	4
3. Включение Bluetooth	5
4. Начало работы с MyFitnessCompanion.....	6
5. Главное окно мобильного приложения MyFitnessCompanion.....	7
6. Подключение прибора к смартфону (Тонометр UA-911BT).....	8
7. Результаты работы прибора и программы после измерений.....	10
8. Подключение к порталу Health Vault.....	11




1. Поиск мобильного приложения MyFitnessCompanion в Google Play Store (Play Market)

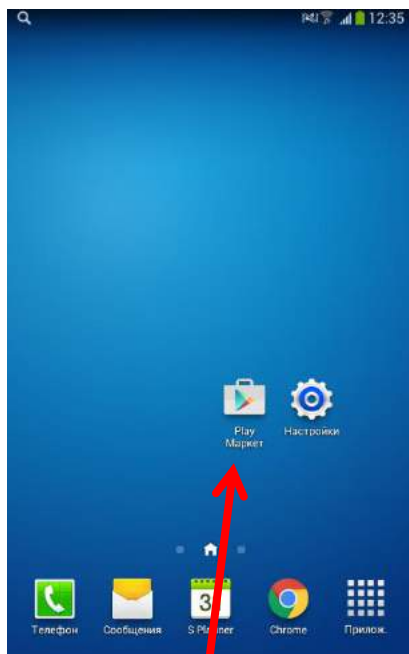

Открываем приложение Play Market

1

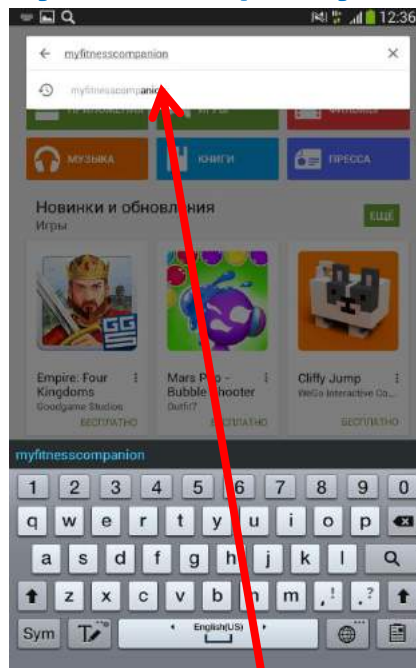

В поисковой строке набираем название программы MyFitnessCompanion

2



Выбираем установку приложения MyFitnessCompanion.
ВАЖНО!

Если у Вас не появился значок приложения MyFitnessCompanion, то модель версии смартфона не поддерживает данное приложение.

3




2. Установка программы MyFitnessCompanion




Выбираем пункт «Установить»

1

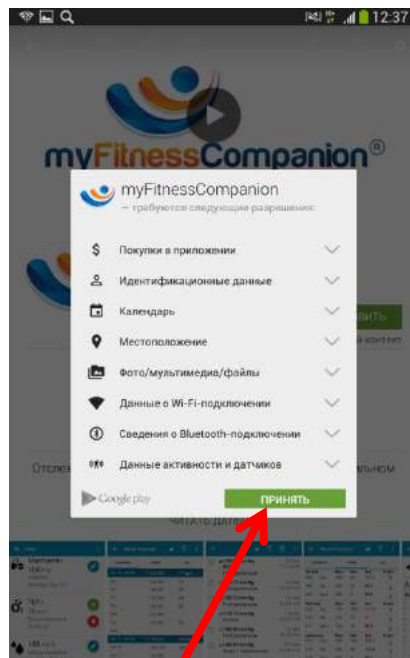


Play Market предлагает Вам принять разрешения для приложения. Выбираем пункт «Принять»

2

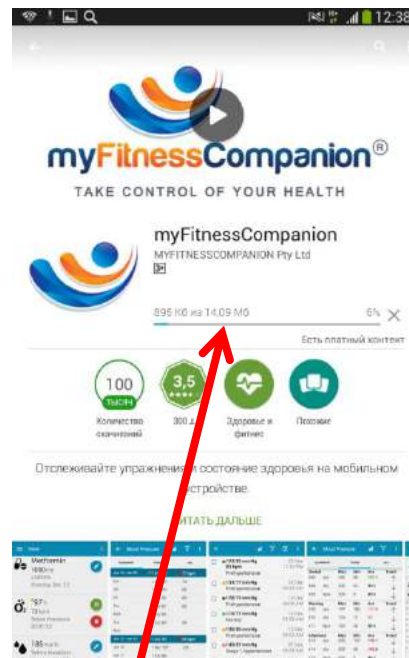

Начинается загрузка приложения

3

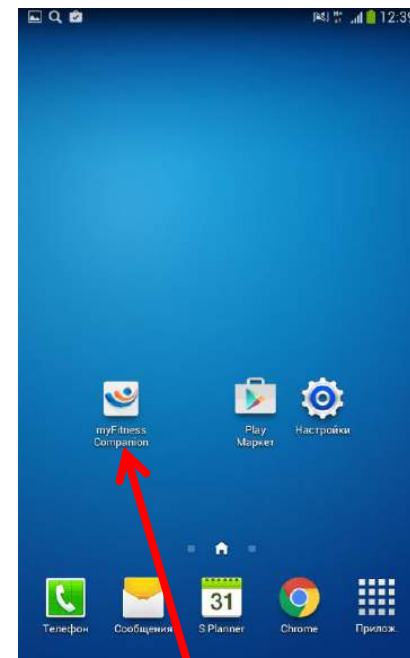


По окончании загрузки на рабочем столе телефона, должен появиться ярлык приложения MyFitnessCompanion

4




3. Включение Bluetooth

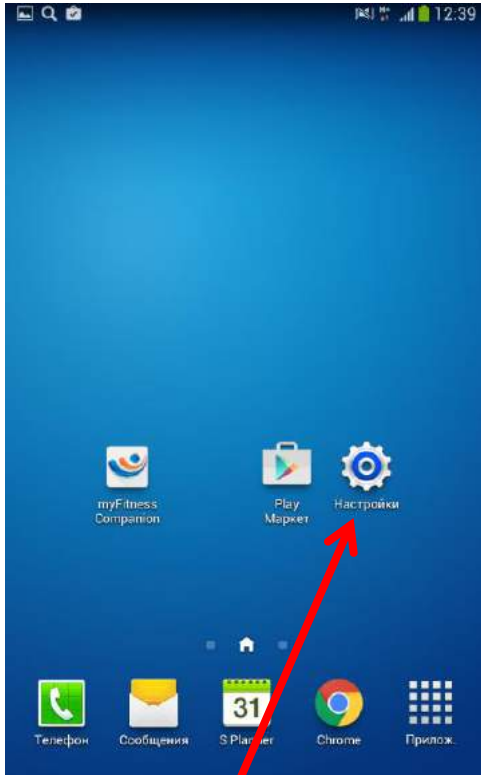


Заходим в пункт «Настройки»

1

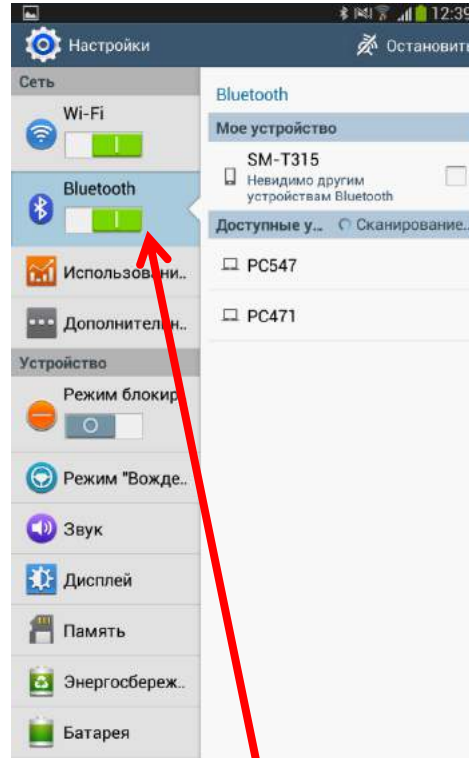

Делаем индикатор Bluetooth активным

2

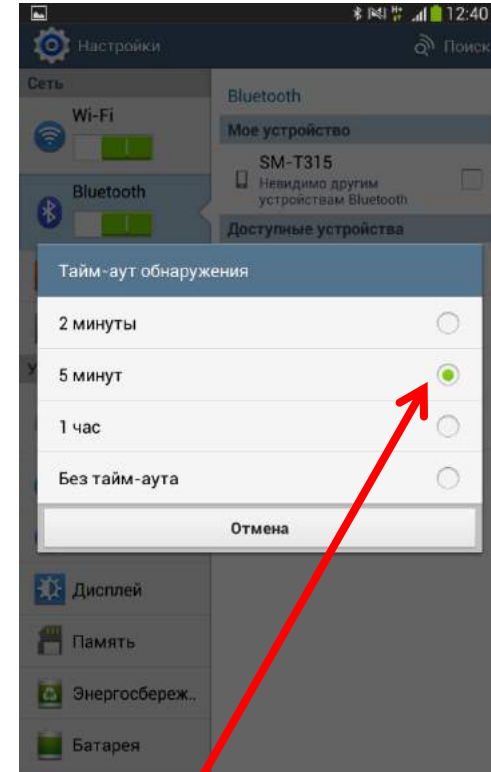


Для обеспечения надежности сопряжения тонометра со смартфоном установим Тайм-Аут обнаружения на минимум 5 минут. Для этого необходимо нажать кнопку «Меню» на Вашем смартфоне, выбрать пункт «Тайм-аут обнаружения» и поставить галочку на 5 минут

3



4. Начало работы с MyFitnessCompanion

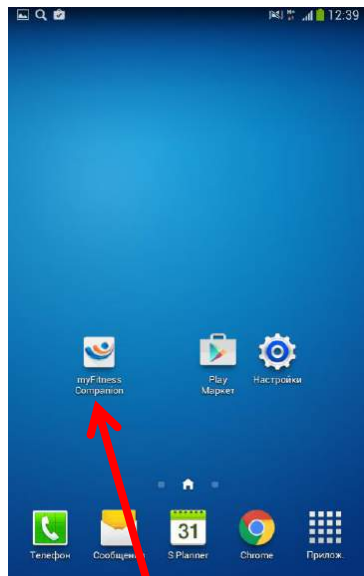


Запускаем приложение MyFitnessCompanion

1




Для начала работы с приложением выбираем пункт «Старт»

2

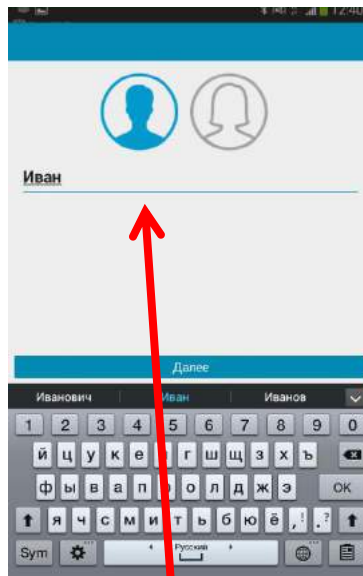


В окне «Персональные данные» в пустой строке вводим «Имя пользователя» и выбираем «Пол». По окончании ждем на «Далее»

3

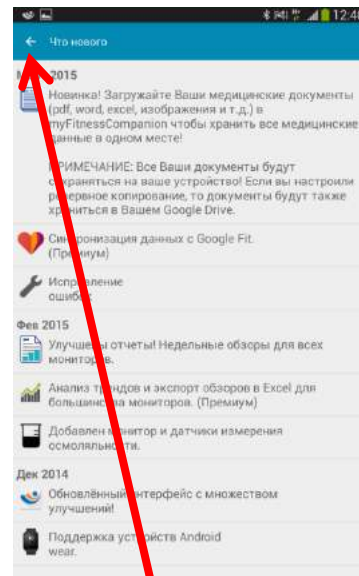

В окне «Что нового» можно ознакомиться с последними обновлениями приложения. Для перехода на главное окно нажимаем стрелочку в верхнем левом углу.

4

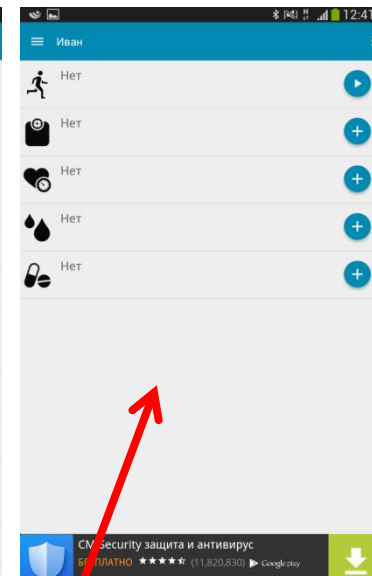


Главное окно приложения (подробно на стр. 7)

5



5. Главное окно мобильного приложения

MyFitnessCompanion

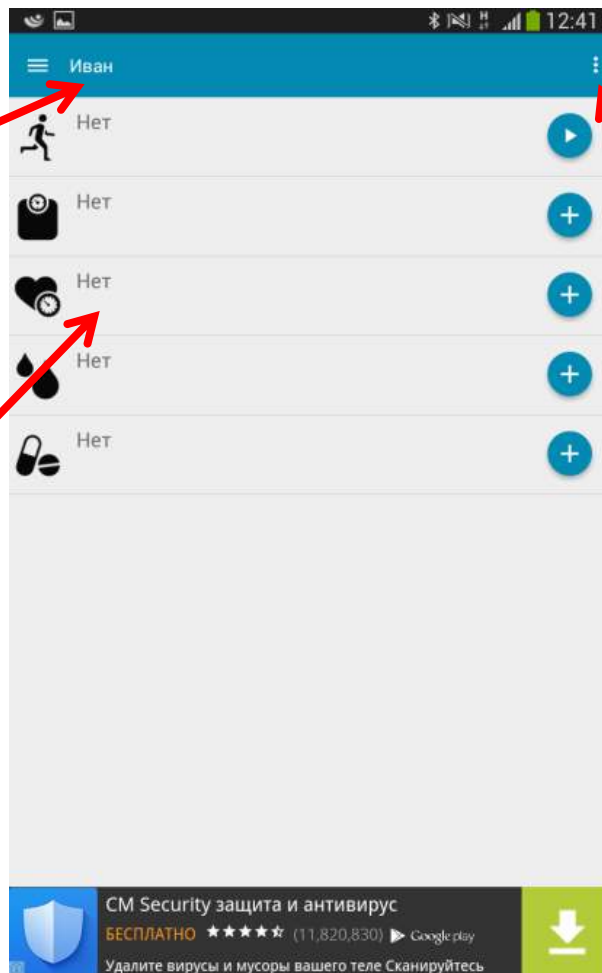


Учетная запись
пользователя

Просмотр измерений
и свойств прибора

Меню настроек
программы




6. Подключение прибора к смартфону (Тонометр UA-911BT)

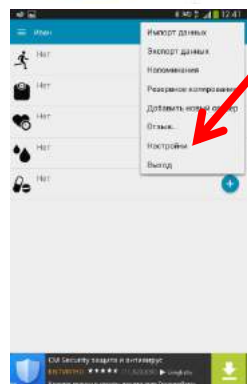


В разделе «Меню» выбираем пункт «Настройки»

1

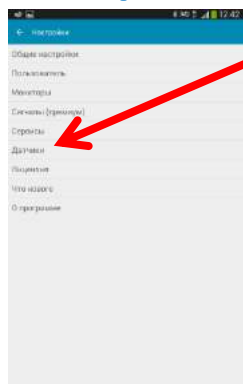


В разделе «Настройки» выбираем пункт «Датчики»

2

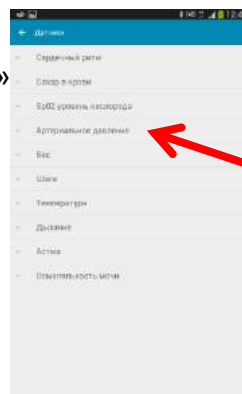


В разделе «Конфигурация датчиков» выбираем пункт «Артериальное давление»

3

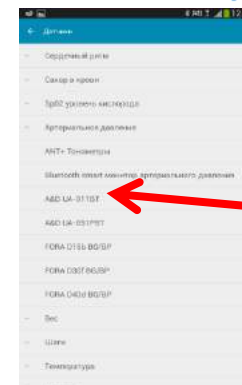

Из списка выбираем прибор A&D UA-911BT

4

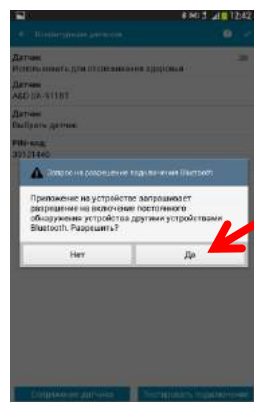

В окне «Запрос на разрешение подключения Bluetooth» нажимаем кнопку «Да»

5




В меню прибора выбираем пункт «Датчик»

6



На обратной стороне тонометра находим идентификационный номер прибора

7

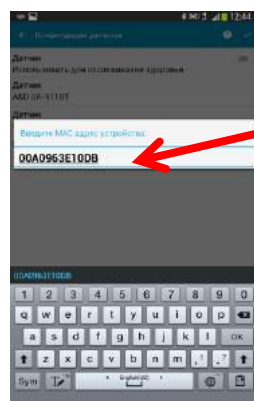

В открывшемся окне пишем идентификационный номер прибора

8




Ставим кнопку «Датчик. Использовать для отслеживания здоровья» в положении Да. После этого необходимо произвести измерение на тонометре. По окончании измерения сразу нажимаем пункт «Тестировать подключение»

9




Подключение прибора к смартфону (Тонометр UA-911BT)

AND
Эй энд Ди, Япония

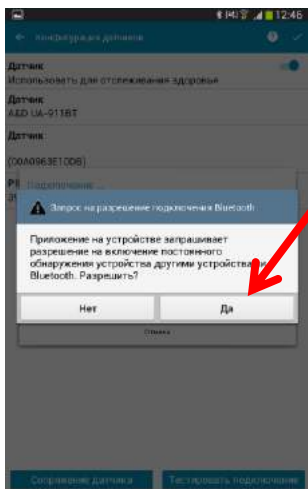


Подтверждаем запрос на включение модуля Bluetooth на приборе.

10

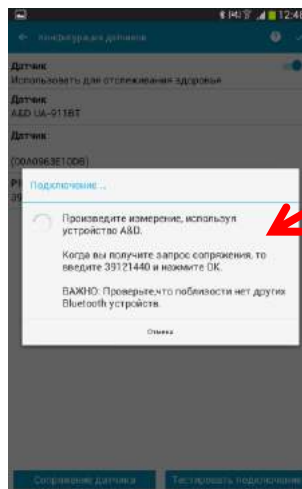


Ожидаем около 2х минут пока программа не добавит Ваш тонометр. В процессе подключения прибора смартфон может выдать сообщение «Прибор подключен» и «Прибор Отключен». Вне зависимости от вида сообщений ожидаем подключения без действий. Программа подключит тонометр автоматически. Если программа сделает запрос о вводе пароля, в строке ввода набираем 39121440.

11

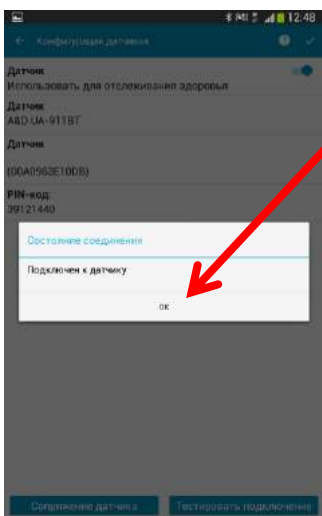

В случае успешного подключения прибора автоматически появится окно «Подключен к датчику»

12

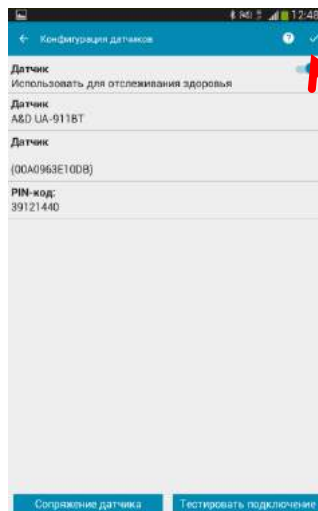

После подключения прибора к телефону выбираем пункт «Сохранить». После этого данные с тонометра после измерения будут автоматически приходить на Ваш смартфон. Так же в настройках Вы сможете настроить голосовое оповещение результатов измерений. В случае отсутствия подключения, попробуйте повторить все с 1 шага

13




7. Результаты работы прибора и программы после измерений



Передача данных с
прибора на телефон




8. Подключение к порталу Health Vault

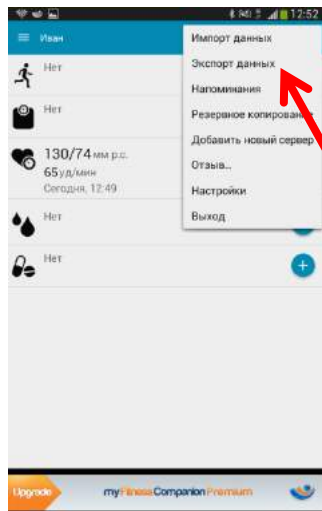

В разделе
«Меню»
экспорт
данных

1

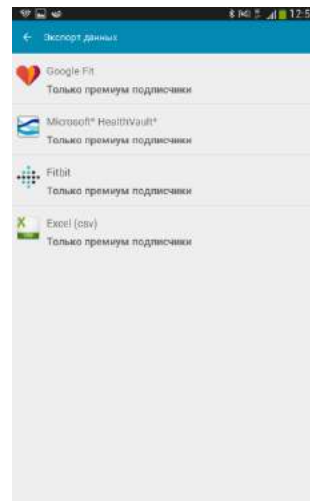

Выбираем пункт «Microsoft Health Vault»

2



Если Вы выбрали один из тарифов, необходимо подписаться, используя Ваши персональные данные для покупок услуг в Google Play. Производится оплата. Далее следуйте инструкциям приложения для настройки подключения портала HealthVault

3



8. Подключение к порталу Health Vault

При успешном подключении и регистрации, данные с Вашего смартфона, подключенного к Интернет, то все полученные на смартфон измерения будут автоматически отправлены на Вашу персональную страницу на портале Health Vault.

Домашняя страница с основными пунктами

Экспорт Ваших данных в формате, удобном для печати

Печать Ваших измерений

Возможность добавить результаты измерения вручную

Результаты Ваших измерений

Текущие медицинские устройства, которыми Вы пользуетесь

В разделе Профиль Вы сможете настроить Свои персональные данные

Список Ваших медицинских измерений

Приложения и устройства, используемые Вами