

# AND


Эй энд Ди, Япония

## Инструкция по подключению тонометра UA-911BT-C к мобильному приложению **A&D Connect** на платформе **iOS**






# 1. Поиск и установка мобильного приложения A&D Connect (App Store)

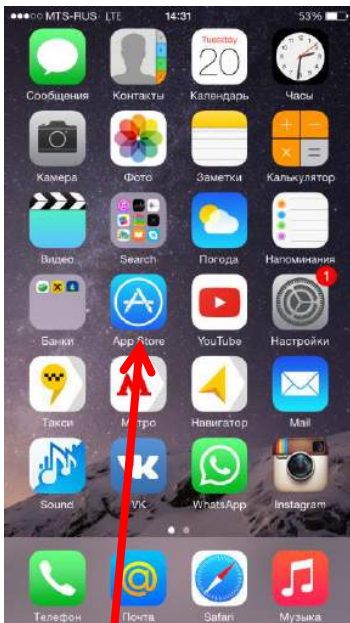


Открываем приложение App Store

1

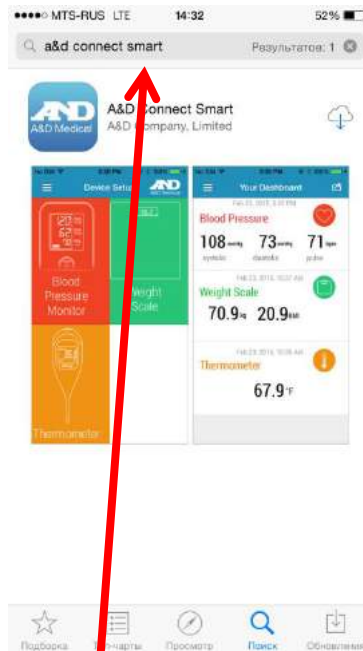

В поисковой строке набираем название программы A&D Connect Smart. Нажимаем на иконку приложения A&D Connect


2

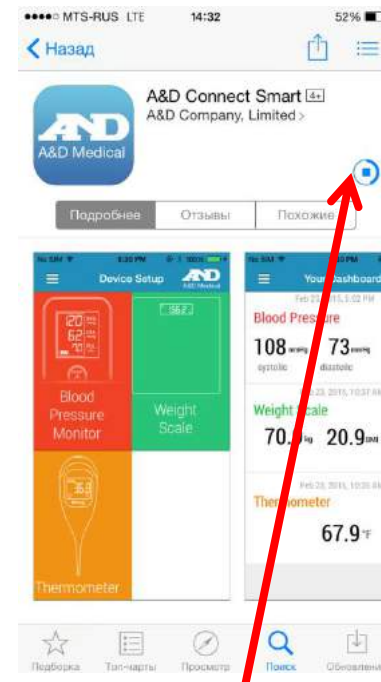

В окне приложения нажимаем кнопку «Загрузить» и «Установить» и ожидаем скачивание и установку программы пока не появится кнопка «Открыть». После установки нажимаем кнопку «Домой»


3

## 2. Включение Bluetooth

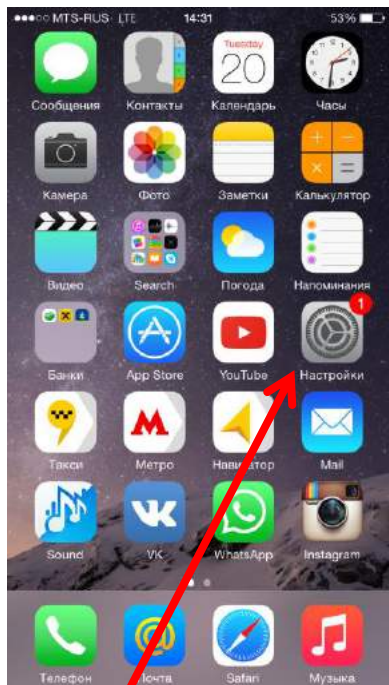


Заходим в пункт «Настройки»

1

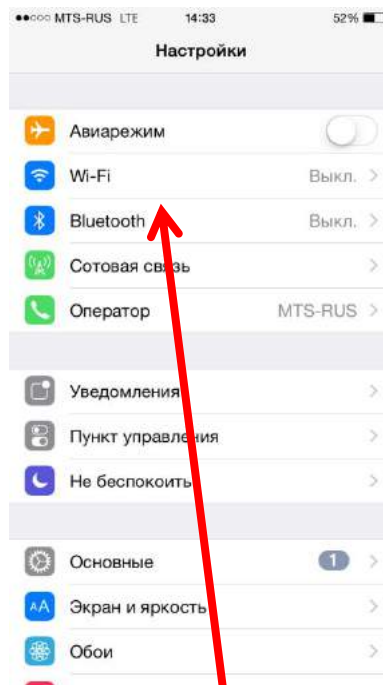

Выбираем пункт Bluetooth

2

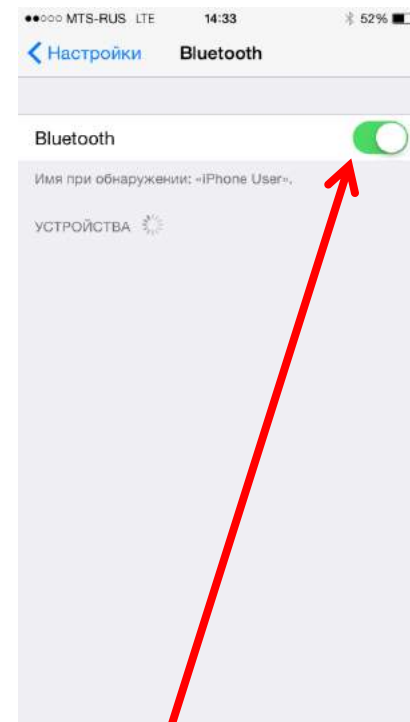


Делаем индикатор Bluetooth активным. После установки нажимаем кнопку «Домой»

3




### 3. Начало работы с A&D Connect

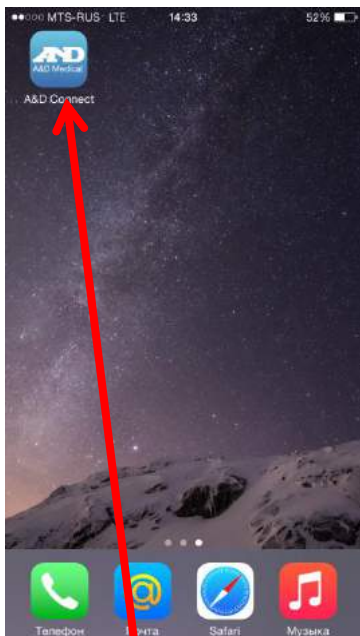


Запускаем приложение A&D Connect

1

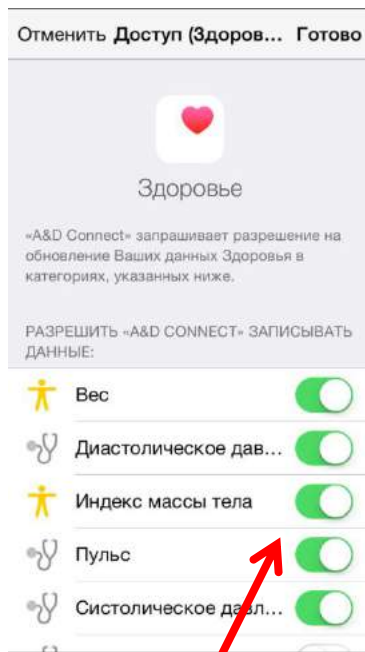

Приложение «Здоровье» (только на версиях iOS 9 и выше) запросит Вас о возможности синхронизации данных с приложением A&D Connect. Отметьте необходимые Вам данные (данное окно открывается при первом запуске программы)

2

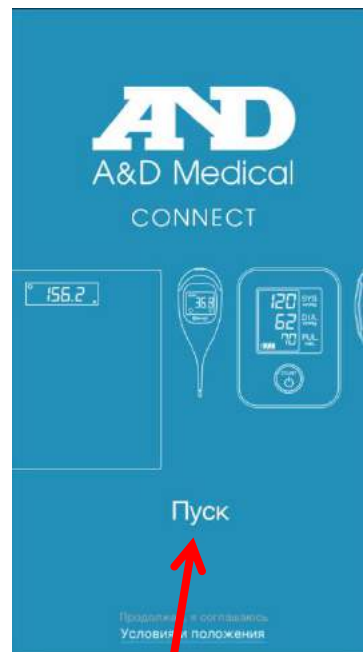

Нажимаем на кнопку «Пуск»

3



После успешно совершенных шагов Вы попадаете в окно «Настройка устройства»


4




**1** Подготовьте тонومتر UA-911BT-C. Нажмите в приложении на кнопку «Blood Pressure Monitor»



**2** Убедитесь что Bluetooth включен на Вашем устройстве.

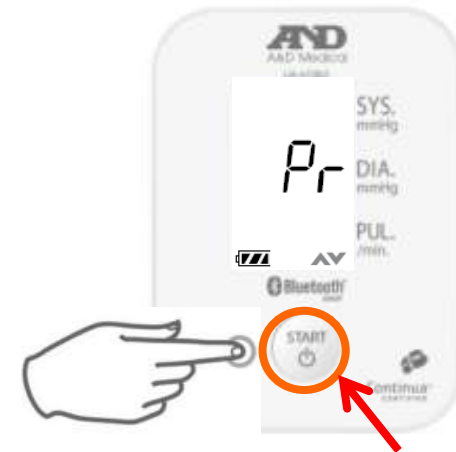


**3** Нажмите и удерживайте кнопку «Старт» пока не увидите Pr на экране тонмометра.

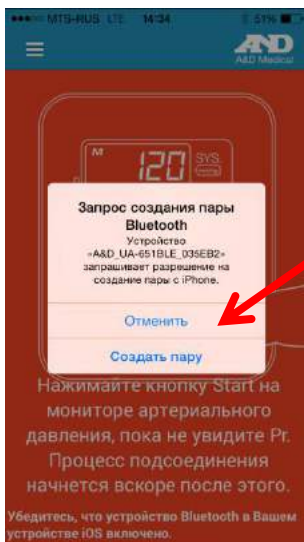

После соединения с тонмометром появится окно «Запрос на соединение пары Bluetooth». Нажимаем кнопку «Создать пару»

**4**

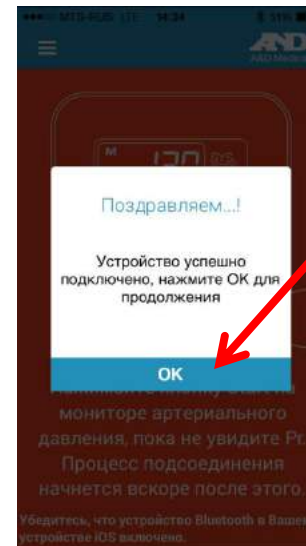


Устройство успешно подключено. Нажимаем OK и переходим в «Панель управления». Дождитесь пока на экране тонмометра появится символ «End»

**5**



## 5. Результаты работы прибора и программы после измерений

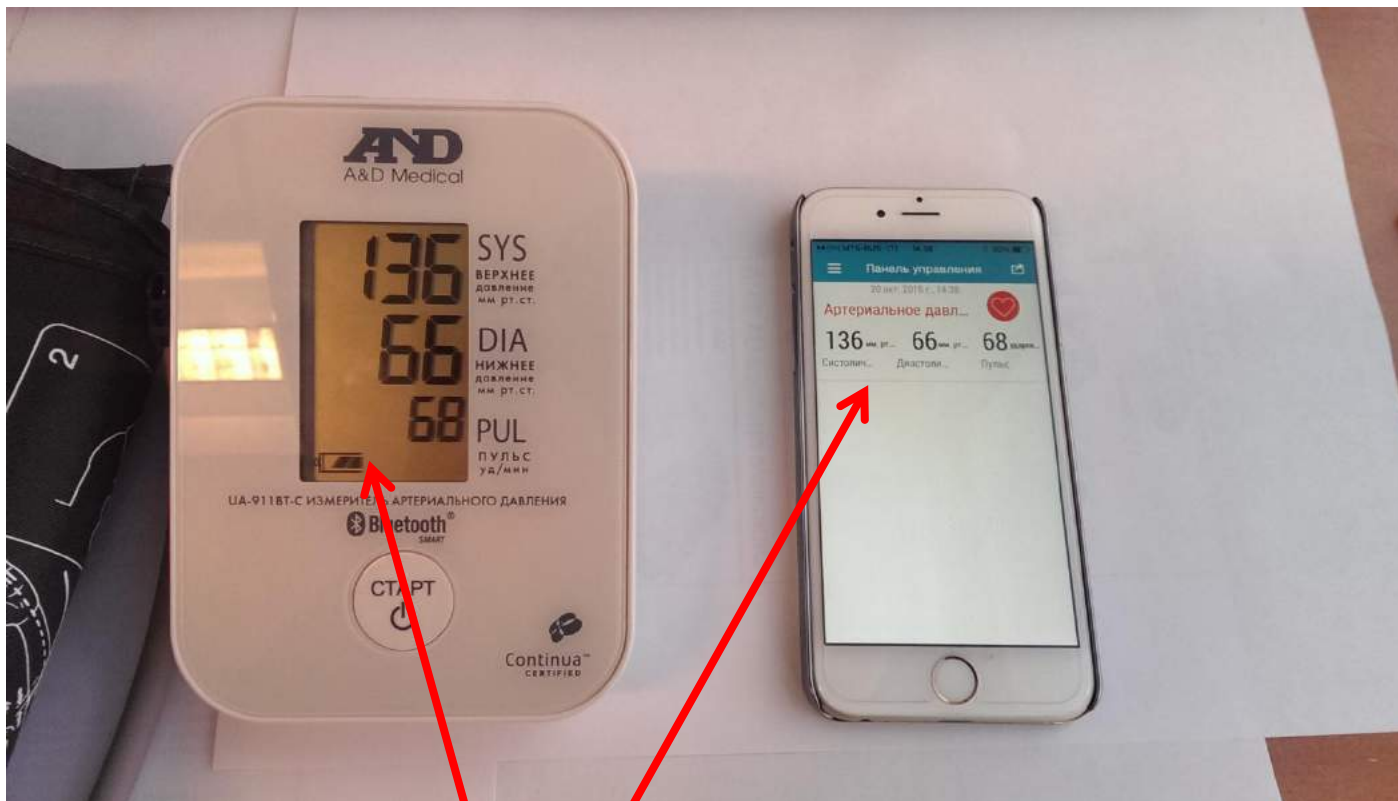


Откройте «Панель управления» на своем устройстве и сделайте измерение на тонометре. Данные передадутся на смартфон автоматически.

## 6. Главное окно мобильного приложения A&D Connect

Учетная запись. Вы можете заполнить свои персональные данные для формирования отчетов

В панели управления Вы можете получать данные с прибора, смотреть графики, статистику, формировать отчеты и экспортировать данные.

В настройке устройства Вы можете подключить тонометр к своему смартфону

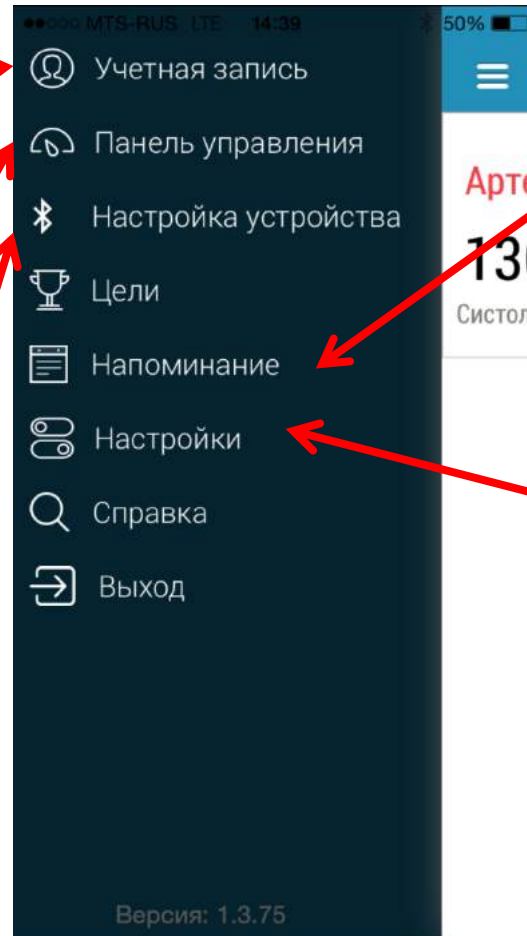

Установка напоминаний поможет Вам не забывать совершать измерения

В пункте настройки Вы сможете подключить учетную запись Microsoft Health Vault и синхронизировать свои данные с личной страницей на портале.

# A&D

Эй энд Ди, Япония

## Инструкция по подключению тонометра UA-911BT-C к мобильному приложению **A&D Connect** на платформе **Android**






# 1. Поиск и установка мобильного приложения A&D Connect (Play Market)



Открываем приложение Play Market

1

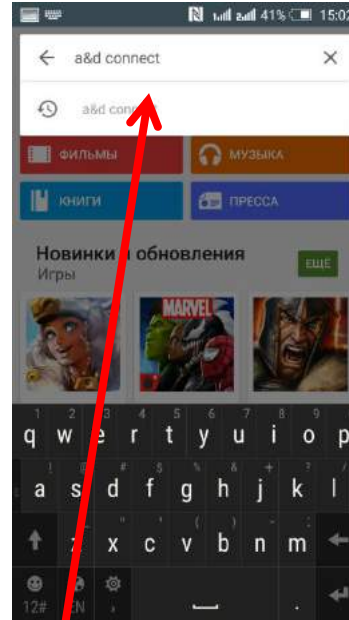

В поисковой строке набираем название программы A&D Connect Smart.


Нажимаем на иконку приложения A&D Connect

**ВНИМАНИЕ!**

Если не удастся найти приложение A&D Connect Smart, проверьте совместимость Вашей модели смартфона на сайте

<http://www.wellnessconnected.jp/english/compatibility/>


2

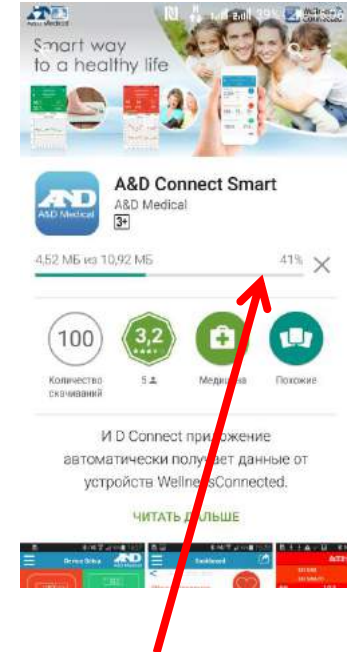

В окне приложения нажимаем кнопку «Установить» и ожидаем скачивание и установку программы пока не появится кнопка «Открыть». После установки нажимаем кнопку «Домой»


3

## 2. Включение Bluetooth

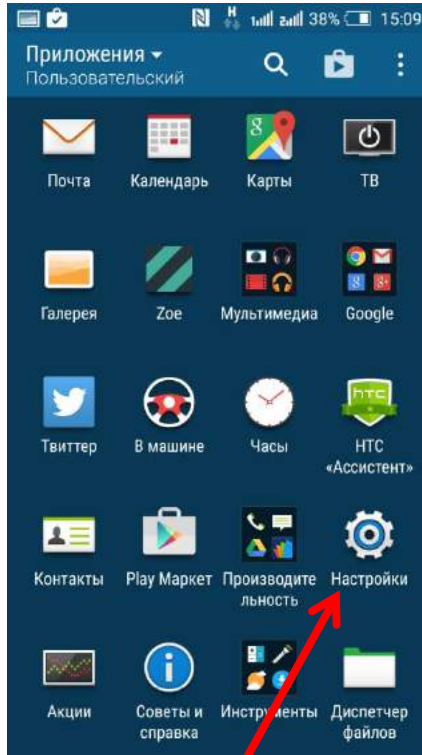

Заходим в пункт  
«Настройки»

1

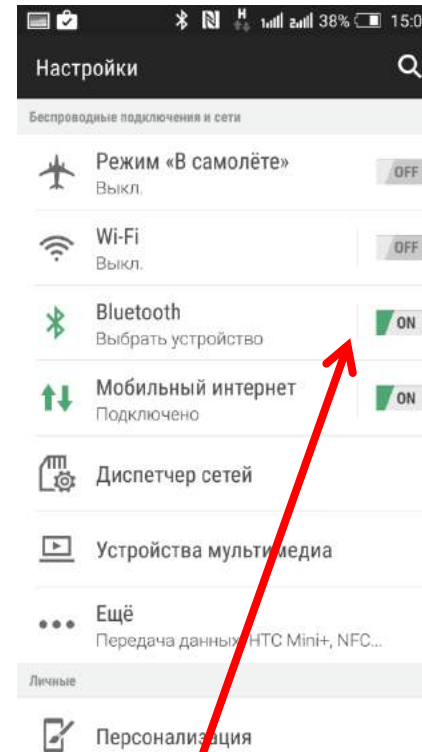

Выбираем пункт  
Bluetooth. Делаем  
индикатор Bluetooth  
активным. После  
установки нажимаем  
кнопку «Домой»

2



### 3. Начало работы с A&D Connect




Запускаем приложение A&D Connect

1



Нажимаем на кнопку «Продолжить»

2

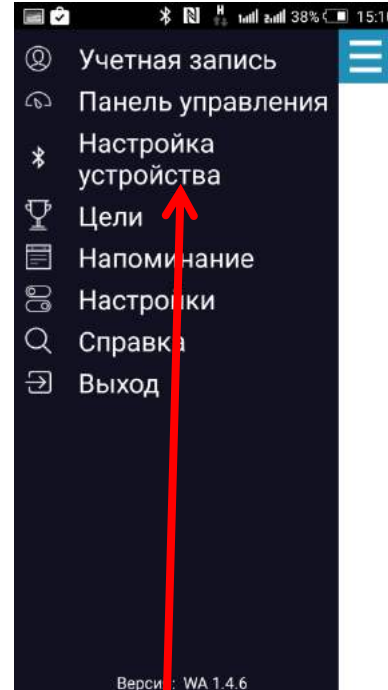

В меню приложения выбираем «Настройка устройства»

3



После успешно совершенных шагов Вы попадаете в окно «Настройка устройства»


4




**1** Подготовьте тонومتر UA-911BT-C. Нажмите в приложении на кнопку «Кровь Pressure Monitor»



**2** Убедитесь что Bluetooth включен на Вашем устройстве.

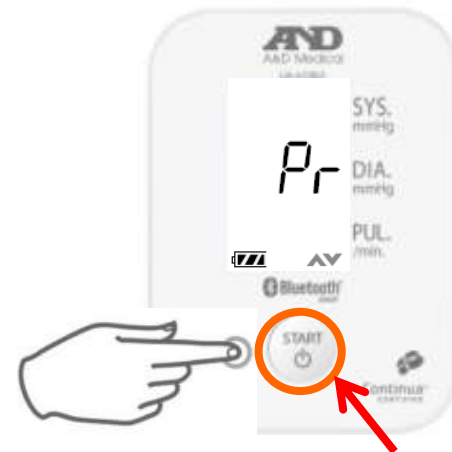


**3** Нажмите и удерживайте кнопку «Старт» пока не увидите Pr на экране тонометра.

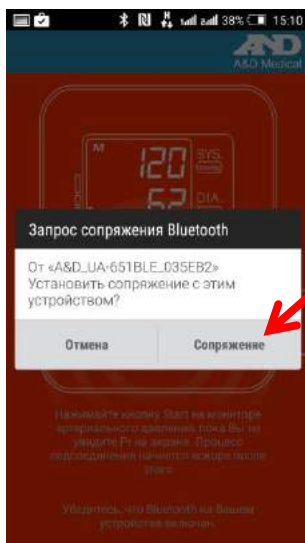

После соединения с тонометром появится окно «Запрос сопряжения Bluetooth». Подтверждаем сопряжение (на разных моделях смартфонов запрос сопряжения может появиться по другому)


**4**

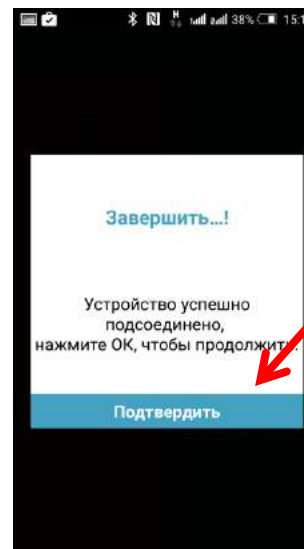

Устройство успешно подключено. Нажимаем Подтвердить и переходим в «Панель управления». Дождитесь пока на экране тонометра появится символ «End»

**5**

## 5. Результаты работы прибора и программы после измерений

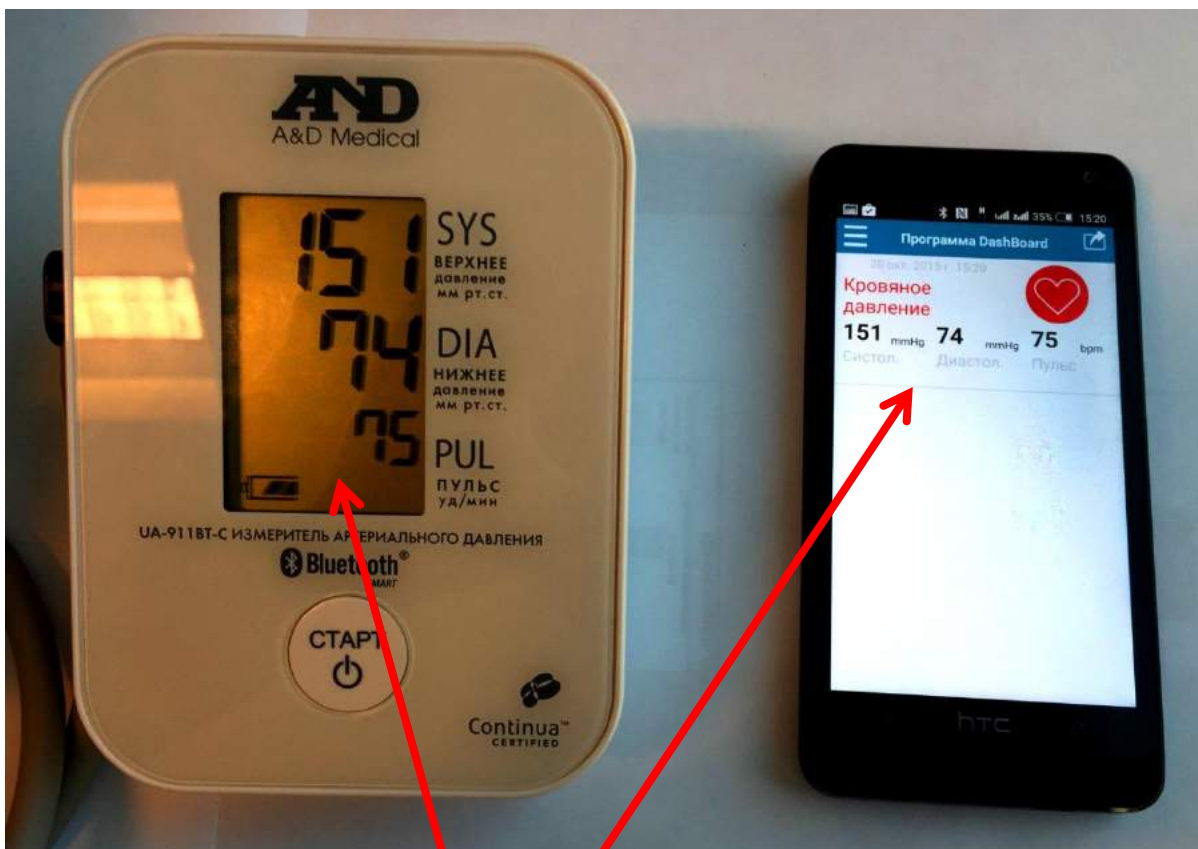

Откройте «Панель управления» на своем устройстве и сделайте измерение на тонометре. Данные передадутся на смартфон автоматически.




## 6. Главное окно мобильного приложения A&D Connect

Учетная запись. Вы можете заполнить свои персональные данные для формирования отчетов

В панели управления Вы можете получать данные с прибора, смотреть графики, статистику, формировать отчеты и экспортировать данные.

В настройке устройства Вы можете подключить тонометр к своему смартфону

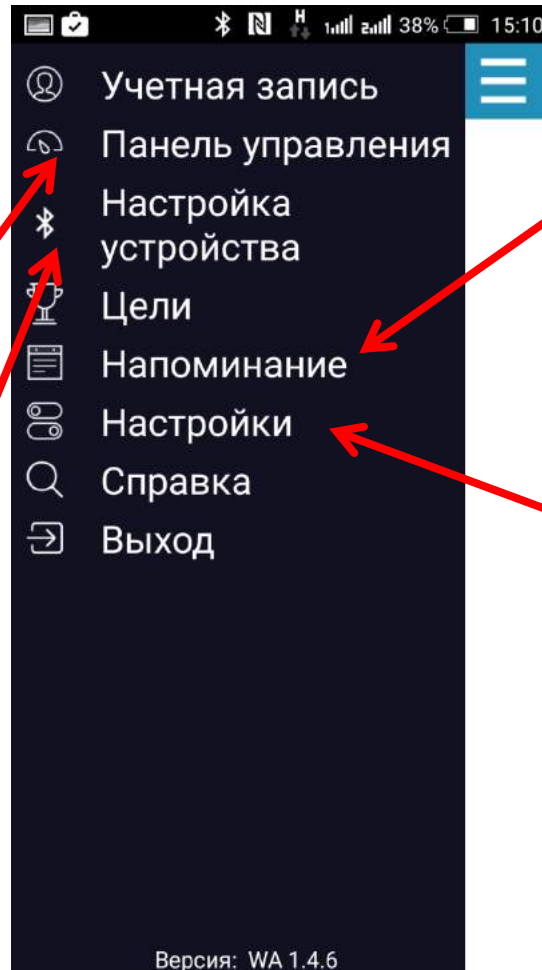

Установка напоминаний поможет Вам не забывать совершать измерения

В пункте настройки Вы сможете подключить учетную запись Microsoft Health Vault и синхронизировать свои данные с личной страницей на портале.